



Am Rettelloh 15
92342 Freystadt
Tel. +49 (0) 91 79 – 94614 0
Fax +49 (0) 91 79 – 9461420
Info@EP-Ants.de
www.EP-Ants.de

Anleitung und Informationen des Herstellers

Documentation and how to use

REF: EP Ants Face shield 500-10911-2001
Produktkennzeichnung: EPANTS CE
Handelsmarke: EP Ants GmbH
Hersteller: EP Ants GmbH
Herstellerkürzel : EPANTS

- 1) Verwendung/
Eigenschaften:
- Erfüllt grundlegende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der PSA Verordnung. Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen. Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben. Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) ist nur für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung zu verwenden. Wenn anwendbar: Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken. Nach Gebrauch entsorgen! Eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.



2) Risikobeurteilung:

Risiken vor denen die PSA schützen soll:

Dieses Produkt schützt gegen Gefährdungsarten, welche in Abschnitt 1 aufgelistet sind

Risiken, die von dem Produkt ausgehen:


Dieses Augenschutzgerät bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen
Dieses Augenschutzgerät bietet keinen Schutz gegen Strahlungsarten (z.B. Sonnenstrahlung, UV, Schweißen, IR)
Dieses Augenschutzgerät ist nur zur Anwendung bei Raumtemperatur.
Dieses Augenschutzgerät ist nicht Feuerresistent. Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
Kein beschädigtes Augenschutzgerät verwenden, es kann die Sicht und den Schutz beeinflussen.
Wenn das Augenschutzgerät beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.
Das Augenschutzgerät nach Gebrauch entsorgen.

Notwendige Warnhinweise, um die Risiken zu minimieren:

Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen
Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben.
Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) ist nur für medizinisches Fachpersonal oder von Mitarbeitern der Rettungsdienste und nur für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung zu verwenden.
Wenn anwendbar: Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken.
Nach Gebrauch entsorgen! Eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.



3) Entwurfs- und Fertigungszeichnungen

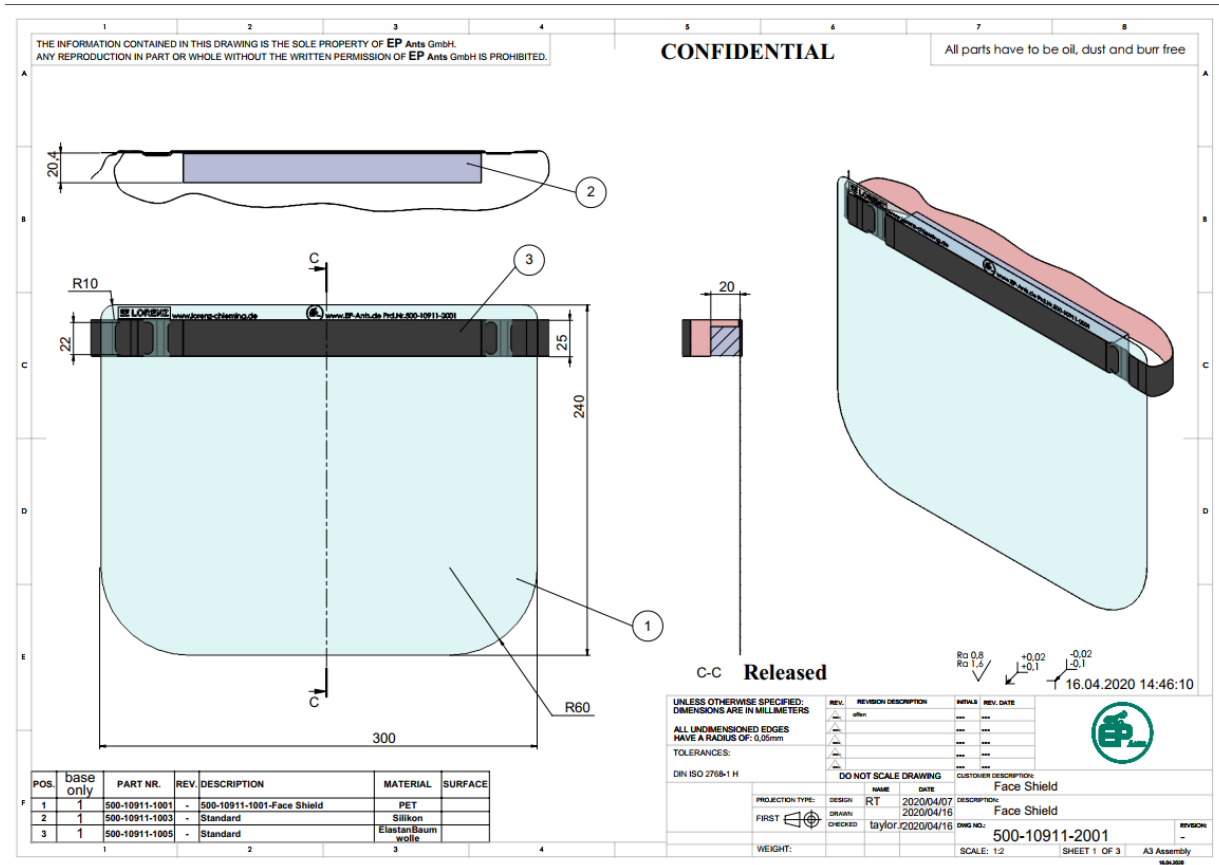

EP Ants GmbH
domiciled in Greding
Deployment and
distribution of
electronic devices
Corporation GmbH
Managing director Josef
Frank
Managing director Rick A.

Bank: Sparkasse Mittelfranken-
Süd
Bank code: 764 500 00
Account number: 221 256 928
IBAN: DE 937 645 000 002
212 569 28
BIC: BYLADE M1S RS

It applies the standard
Business conditions
District Court Nuremberg
Jurisdiction is Germany
Tax number: 241 / 125 / 702 13
Purchase tax number: DE 2 52 53
93 05
Commercial register: HRB 2 31 68

EP Ants GmbH
Sitz Greding
Entwicklung und Vertrieb
elektronischer Bauteile
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Geschäftsführer Josef Frank
Geschäftsführer Rick A. Taylor

Bank: Sparkasse
Mittelfranken-Süd
Bankleitzahl: 764 500 00
Kontonummer: 221 256 928
IBAN: DE 937 645 000 002
212 569 28
BIC: BYLADE M1S RS

Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen
Amtsgericht Nürnberg
Gerichtsstand ist Deutschland
Steuernummer: 241 / 125 / 702 13
Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE 2 52 53 93
05
Handelsregister: HRB 2 31 68



Materialübersicht:

Kopfpolsterung: Silikon in ergonomischer Passform,
Gummiband: gut sitzendes elastisches Band, Elasthan mit Baumwolle
Schild / Sichtscheibe: PMMA (Polymethylmethacrylat),
* Minimierte Extrusionslinien, dadurch Glas -ähnliche Transparenz.

Varianten :

Farben

Farben: Sichtscheibe: Transparent

Tragkörper : Weiß
Kopfband : Schwarz

Größen: Einheitsgröße verstellbares Kopfband

4) Zubehör: Kein Zubehör

5) Harmonisierte Normen

PSA Verordnung (EU) 2016/425

Sichtscheiben gemäß 2001/95/EG



6) Informationen des Herstellers

Produktbeschreibung: Augenschild mit weichem Silikonpolster für absoluten Komfort beim Dauereinsatz. Leicht und bequem. Optische Klasse 1. als Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer. Bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.

Anwendungsbereiche: Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos und eignen sich für den medizinischen Bereich. Durch die verzerrungsfreie Sicht, und durch das extrem geringe Gewicht eignet sich der Schild für den dauerhaften Einsatz.

Qualitätsmerkmale:

Schild: Die Verwendung von Polymethylmethacrylat garantiert eine distorsionsfreie Sicht. Die abgerundeten Ecken ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes.

Kopfbänder: Die Bänderung erfolgt nicht hinter den Ohren sondern hinter dem Kopf. Dadurch wird eine unbeschwerte Nutzung über viele Stunden garantiert. Durch den Einsatz latexreduzierter Materialien werden latexallergische Reaktionen weitestgehend vermieden

Kopfpolster: Extrem leicht, hautfreundlich und atmungsaktiv. Durch die spezielle Konstruktion wird eine optimale anatomische Passform erreicht.

Dermatologische Verträglichkeit: Keine Intoleranzreaktionen bekannt

Reinigung und Desinfektion : Beständig gegen Isopropanol 99,9% 5% Terralin Lösung , mikrocid Sensitive Wipes

EP Ants GmbH Am Rettelloh 15 92342 Freystadt Germany
Verpackungseinheit: 30 Stück im Karton



Lagerung: Ohne direkte Sonneneinstrahlung,
in Originalverpackung trocken lagern,
siehe auch Verpackung.

Maximale
Lagerfähigkeit: 3 Jahre

Entsorgung: Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt
werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.

Zusätzlich: Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille,
Gesichtsschutzschild) schützt gegen Tropfen und
Spritzer von Flüssigkeiten. (Nur wenn Schutz
gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten
geprüft wurde) Damit reduziert es die Gefährdung
durch eine Tröpfcheninfektion. Ein
vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien
oder andere biologische Agenzien ist
konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben.
Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) ist
nur für medizinisches Fachpersonal oder von Mitarbeitern der
Rettungsdienste und nur für die Dauer der derzeitigen
Gesundheitsbedrohung zu verwenden.
Das Produkt bietet keinen Schutz gegen mechanische
Einwirkungen. Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken (wenn
anwendbar). Nach Gebrauch entsorgen! Eine Wiederverwendung
liegt im Ermessen des Verwenders.

7) Die notifizierte Stelle für PSA Verordnung 2016/425/EU

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin, Germany
(Notified Body No.: 0196
hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-
Baumusterprüfbescheinigung Cxxx ausgestellt

7)8) Fundstellen der Normung und aller Dokumentationen zur PSA

EP Ants GmbH
domiciled in Greding
Deployment and
distribution of
electronic devices
Corporation GmbH
Managing director Josef
Frank
Managing director Rick A.

Bank: Sparkasse Mittelfranken-
Süd
Bank code: 764 500 00
Account number: 221 256 928
IBAN: DE 937 645 000 002
212 569 28
BIC: BYLADE M1S RS

It applies the standard
Business conditions
District Court Nuremberg
Jurisdiction is Germany
Tax number: 241 / 125 / 702 13
Purchase tax number: DE 2 52 53
93 05
Commercial register: HRB 2 31 68

EP Ants GmbH
Sitz Greding
Entwicklung und Vertrieb
elektronischer Bauteile
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Geschäftsführer Josef Frank
Geschäftsführer Rick A. Taylor

Bank: Sparkasse
Mittelfranken-Süd
Bankleitzahl: 764 500 00
Kontonummer: 221 256 928
IBAN: DE 937 645 000 002
212 569 28
BIC: BYLADE M1S RS

Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen
Amtsgericht Nürnberg
Gerichtsstand ist Deutschland
Steuernummer: 241 / 125 / 702 13
Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE 2 52 53 93
05
Handelsregister: HRB 2 31 68



Norm EN166:2001

<https://www.beuth.de/de/publikation/din-en-166-sonderausgabe/322830289>

Dokumentation und Datenblätter

<http://ep-ants.de/text/products/medical-eq-de.html>

**Bei kontaminierten Produkten bestimmen die Art und das Ausmaß der Kontamination
Die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.**